

WWW.CEKA-PRECILINE.COM

SWISS MADE

CE 0510




Pobrać wycisk. Pierścień na sztyfcie zapewnia mechaniczną retencję i zapewnia dobre umocowanie w masie wyciskowej.



Samoizolujący sztyft umożliwia dokładne odwzorowanie kanału korzeniowego.



Proszę użyć przezroczystego sztyftu w kolorze odpowiednim do koloru sztyftu z wycisku.

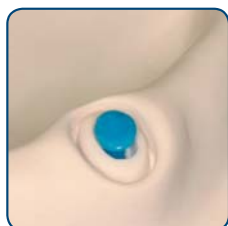

Do skrócenia sztyft proszę użyć gorącego instrumentu i nadtopić koniec celem zwiększenia retencji do wosku.



Proszę domodelować z wosku pozostałą częśći wkładu i zalać masą ognioodporną w pierścieniu. Pierścień umieścić w piecu. Podgrzać do temperatury 250 °C i przetrzymać przez 30 min a następnie podgrzewać do temperatury końcowej.

CEKA
ATTACHMENTS
PRECILINE

CEKA REVAX

CEKA SOL

PRECIL-HORIX

PRECIL-VERTIX

PRECIL-VERTIX AT

PRECIL-BAR

PRECIL-BALL

PRECIL-CLIP

PRECIL-CLIX EXTRACORONAL

PRECIL-CLIX AXIAL

PRECIL-CLIX RADICULAR

PRECIL-TUBIX/MORTIX

PRECIL-POST

PERMA-RET

3C-BOND

EXPANDO

PRECIL-POST

PRECIL-POST

Prospekt Nr. 261.PO-ed.A
Copyright© ALPHADENT NV 2/2008
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

Division of **ARSEUS**
DENTAL

ALPHADENT NV
Textielstraat 24
8790 Waregem, Belgium
tel +32 56 629 100
fax +32 56 629 101
e-mail: info@ceka-preciline.com



PRECI-POST M SYSTEM

STOŻEK: 2° 30'



REF. 2001

PRECI-POST-ZESTAW:

- 1 wiertło żółte
- 1 wiertło niebieskie
- 25 sztyfty do wycisku żółte opakerowe
- 25 sztyfty do wycisku niebieskie opakerowe
- 25 sztyfty laboratoryjne żółte transparentne
- 25 sztyfty laboratoryjne niebieskie transparentne



Proszę spreparować kanał i skalibrować przy pomocy żółtego lub niebieskiego wiertła.



Proszę wykonać dojscie do kanału korzeniowego ze stopniem. Proszę dokończyć preparowania powierzchni i brzegów korzenia.



Proszę włożyć sztyft z pierścieniem do kanału w kolorze opakerowym odpowiednio do zastosowanego wcześniej wiertła.

						
Ø zakończenie	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm
długość części stożkowej			10,7 mm	12,3 mm		12,3 mm
długość całkowita		14,1 mm	18,6 mm		16,7 mm	22,9 mm
REF.						
2001	1 x	25 x	25 x	1 x	25 x	25 x
2002		50 x			50 x	
2002G		50 x				
2002B					50 x	
2003L			50 x			50 x
2003GL			50 x			
2003BL						50 x
2004G	1 x					
2004B				1 x		